

Clearblue[®] PLUS

SZÍNÁLVÁTO VÉGGEL

Terhességi teszt

- A Clearblue[®] PLUS 99% feletti megbízhatóságot nyújt már a menstruáció esedékességének első napjától
 - A Clearblue[®] PLUS akár 5 nappal a menstruáció kimaradása előtt használható
- Kérjük, hogy a teszt elvégzése előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

Mielőtt elkezdi a tesztelést:

A teszt elvégzésekor hasznos lehet, ha van Önnél karóra, vagy más óra.

1 A TESZT ELVÉGZÉSE

Ha a tesztet a menstruáció esedékességének első napja után végzi, akkor a tesztet a nap folyamán bármikor elvégezheti.

Ha a menstruáció esedékessége előtt végzi el a tesztet, akkor erre a célra használja a reggeli első vizeletet.

Amikor készen áll a teszt elvégzésére, vegye ki a tesztcsíkot a fóliacsomagolásból, és vegye le a kék kupakot. Azonnal használja fel a tesztcsíkot.

VIZELETTESZT

A tesztet végezheti közvetlenül a vizeletsugárban vagy tiszta, száraz tartályba gyűjtött vizeletmintával.



2

- Tartsa a tesztcsíkot a színváltó végével lefelé mutató helyzetben a vizeletsugárba vagy az összegyűjtött vizeletmintába az ábrán látható módon **5 teljes másodpercig**.
- A színváltó vég azonnal rózsaszínre vált, ami azt jelzi, hogy vizeletet szív magába. A színváltó végét **5 másodpercen keresztül folyamatosan a vizeletben kell tartani**.



A színváltó végét 5 másodpercig keresztül folyamatosan a vizeletben kell tartani. Számoljon 5 másodpercig, amint észreveszi, hogy a színváltó vég rózsaszínre vált.

Vizeletsugár VAGY Összegyűjtött minta

3

- Tartsa a tesztcsíkot a színváltó végével lefelé mutató helyzetben, vagy fektesse le lapos felületre addig, amíg készen nem áll az eredmény leolvasására, és az ellenőrző ablakban meg nem jelenik a kék csík.
- Ezután visszahelyezheti a kupakot.

Ha a színváltó vég nem váltik teljesen rózsaszínre, olvassa el a 7. kérdést.


2

3 perc

VÁRJON 3 PERCET.

A teszt működését a két csík(ok) megjelenése jelzi.

Eredményjelző ablak Ellenőrző ablak

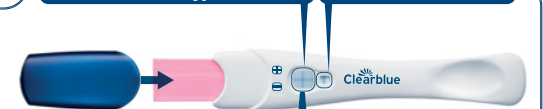

3 AZ EREDMÉNY LEOLVASÁSA.

Eredményét az eredményjelző ablakban olvashatja le.

A kék csíknak meg kell jelennie az ellenőrző ablakban az eredmény leolvasásakor. A vonal jelzi, hogy a teszt sikeres.

A „Terhes” eredmény akár 1 percen belül megjelenhet, ha a menstruáció kimaradásának első napjától végzi a tesztet (ami az esedékes de elmaradt menstruáció napját követő nap). Várjon 3 teljes percet a „Nem terhes” eredmény megértesítés érdekében, illetve akkor, ha a menstruáció kimaradása előtt végzi el a tesztet (olvassa el a 10. kérdést).

Ha az ellenőrző ablakban 10 percen belül nem jelenik meg a kék csík, akkor a teszt nem sikerült (olvassa el a 7. kérdést).



NEM TERHES

TERHES

A kép

B kép

C kép

Ha az eredmény „Nem terhes”, akkor olvassa el a 12. kérdést a Kérdések és válaszok részben.

Ha az eredmény „Terhes”, akkor olvassa el a 13. kérdést a Kérdések és válaszok részben.

Nem számít, ha a „+” szimbólumot alkotó egyik vonal világosabb vagy sötétebb mint a másik; az eredmény mindenképpen „Terhes”.

FONTOS!

A teszt elvégzésétől számított 10 percen belül olvassa le az eredményt. Az ezután bekövetkező változásokat ne vegye figyelembe.

Ha továbbra is bizonytalan az eredményben, akkor a részletekért olvassa el a 8. kérdést.

Kérdések és válaszok – Kérjük, olvassa el az alábbi szakaszt, mely választ ad a leggyakrabban feltett kérdésekre.

Kérdések és válaszok

1 Mennyire megbízható a Clearblue[®] PLUS teszt?

Laboratóriumi vizsgálatokban a Clearblue[®] PLUS teszt megbízhatósága 99% feletti a menstruáció esedékességének első napja után alkalmazva.

2 Hogyan működik a Clearblue[®] PLUS teszt?

Ha Ön terhes, szervezete egy hCG (humán choriongonadotropin) nevű terhességi hormont termel. A terhesség korai szakaszában a szervezet hCG mennyisége megemelkedik. A Clearblue[®] PLUS teszt ezt a hormont már kis mennyiségben is kimutatja a vizeletből (a vizsgálat érzékenysége 25mIU/ml).

3 Mikor végezhet tesztet a Clearblue[®] PLUS segítségével?

A Clearblue[®] PLUS teszt legkorábban 5 nappal a menstruáció kimaradása előtt használható (azaz 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt). Ha a tesztet a menstruáció esedékessége előtt végzi el, és „Nem terhes” eredményt kap, továbbra is fennáll annak az esélye, hogy Ön terhes. További információkért tekintse át a lenti táblázatban a Clearblue[®] PLUS korai terhességi mintákkal végzett klinikai vizsgálatának eredményeit.

szabálytalan lehet, melynek következtében előfordulhat, hogy túl korán végzi el a tesztet.

• Ha nemrég terhes volt (még ha nem is hordta ki a teljes időtartamot), akkor előfordulhat, hogy téves „Terhes” eredményt kap.

• A méhen kívüli terhesség, petővesztésközta, menopauza és néhány igen ritka korallapít is okozhat félrevezető eredményt.

• „Terhes” eredmény esetén előfordulhat, hogy a későbbiekben a terhesség korai szakaszában bekövetkező korai természetes vetélés miatt mégsem marad terhes. Ha váratlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.

7 Elvégeztem a terhességi tesztet, de a színváltó vég nem lett teljesen rózsaszín. Mit kell tennem?

Ha a színváltó vég nem színeződik teljesen rózsaszínre, akkor lehetséges, hogy nem itatta át elegendő vizeletet. Azonban, ha az ellenőrző ablakban lévő kék csík a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül megjelenik, akkor a teszt működésképes. Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék csík az ellenőrző ablakban, akkor olvassa el a 8. kérdést.

8 Elvégeztem a tesztet, de az ellenőrző ablakban nem jelent meg a kék csík. Mit kell tennem?

Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék csík az ellenőrző ablakban, akkor a teszt nem működésképes. Ennek a következő okai lehetnek:

• A színváltó vég nem volt lefelé néző helyzetben, vagy a tesztcsík a vizeletbe mártás után nem lett elfektetve. A mintavételnek 5 másodpercig kell tartania. Ismételje meg a tesztet új tesztcsíkkal, és gondosan tartsa be az utasításokat. A vizeletmintát akár egy tiszta, száraz tartályba is leveheti, melybe aztán kizárólag a színváltó végét mártja bele csupán 5 másodpercig.

9 Mit teyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?

• A „Terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül egy kék csík jelenjen meg az ellenőrző ablakban, illetve egy „+” szimbólum az eredményjelző ablakban. A „+” szimbólum többféleképpen jelenhet meg az eredményjelző ablakban, ám a „+” szimbólumot alkotó vonalaknak és az ellenőrző ablakban lévő csíknak hasonló szélességűnek kell lenniük (lásd az A–C képeket).

A kép
Az A kép „Terhes” eredményt jelez. Ez a kép akkor valószínű, ha a tesztet a menstruáció esedékességének napja előtt végzi, amikor a hCG-szint még viszonylag alacsony lehet.

B kép
Ez a kép nem szokatlan, ha Ön terhes, és a tesztet a menstruáció esedékességének napján vagy akárkor végzi, ugyanis a hCG-szint ekkor még szintén viszonylag alacsony lehet.

IVD	In vitro diagnosztikai orvosi eszköz	LOT	Gyártási szám	Ne használja újra!
	Hőmérséklet-tartomány: 2–30 °C		Lejárat dátum:	Gyártja:
				Olvassa el a használati utasítást

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Svájc.

A Clearblue az SPD vállalat védjegye. Gyártás helye: Kína © 2015 SPD. Minden jog fenntartva!

✉ Forgalmazó: ADPH Kft. H-1085 Budapest, Kőlcsey u. 4. 3/7, Magyarország.



A további lépések, információk és a terhességgel kapcsolatos általános tanácsok tekintetében keresse fel honlapunkat:

www.clearblue.com

Ez az eszköz otthoni felhasználásra készült.

Szobahőmérsékleten tárolandó.

Hűtőszekrényben történő tárolás esetén a teszt elvégzése előtt várjon 30 perccel, amíg a teszt el nem éri a szobahőmérsékletet.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra.

Használat után dobja a normál háztartási (kommunális) hulladékba.

Ne használja, ha a fóliacsomagolás sérült.

Ne használjon lejárt szavatosságú tesztcsíkokat.

4 Fontos, hogy reggeli vizelettel végezzem el a tesztet?

Ha a menstruáció esedékessége előtt végzi el a tesztet, akkor javasoljuk, hogy erre a célra használja a reggeli első vizeletet. Egyéb esetben a tesztet a nap folyamán bármikor elvégezheti. A teszt elvégzése előtt kerülje a túlzott folyadékbevitelt.

5 Nem tudom biztosan a menstruáció esedékességének napját. Hogyan bizonyosodhatok meg afelől, hogy a tesztet a megfelelő időben végzem?

Menstruációja esedékességének meghatározásához számítsa ki a ciklusa szokásos hosszát úgy, hogy megszámolja a napokat a menstruáció első napjától a következő menstruációjának kezdete előtti napig.

• Ha a havi ciklusa rendszerlen, akkor a teszt elvégzése előtt az utóbbi hónapok leghosszabb ciklusát vegye figyelembe.

• Ha nem tudja megállapítani a menstruációja esedékességét, akkor azt javasoljuk, hogy az utolsó, védekezés nélküli szexuális érintkezéstől számítva várjon legalább 19 nappal a teszt elvégzéséig.

• Ha az eredmény „Nem terhes”, de a terhesség gyanúja továbbra is fennáll, akkor olvassa el a 13. kérdést.

6 Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?

• A teszt elvégzése előtt mindig olvassa el az aktuálisan szedett gyógyszerek gyártójának utasításait.

• A hCG-tartalmú termékenységet fokozó gyógyszerek félrevezető eredményeket okozhatnak. Ezeket a termékenységet fokozó gyógyszereket általában injekciós adagban és, ha a beadás után túl hamar végzi el a tesztet, téves „Terhes” eredményt kaphat.

• A megtermékenyítést elősegítő anyagok kezelése (például a klomifén-citrát), a fémátomszállítók és hormonális fogamzásgátlók (például fogamzásgátló tabletták) rendszerint nem befolyásolják az eredményt.

• Ha nemrég ivott abba a hormonális fogamzásgátló zsedeként, vagy termékenységet fokozó (pl. klomifén-citrát) kezelésben részesült, akkor a ciklusa